



FAX: 0043-5578-74299
 O
 INTERNET: www.vetmedcare.at

Dr. Norbert Freitag
 VetMedCare

Hauptstr. 35 c
 A-6973 Höchst

Innovaciones para el cuidado animal

Telefon: 0043-5578-76648

Fax: 0043-5578-74299

NIF: ATU 35774408

E-Mail: vetmedcare@vetmedcare.at

Internet: www.vetmedcare.at

Tabla de medidas


No Art.	Articulo	Talla	color: verde	Medida del cuello cm	Medida del tórax cm	Distancia entre patas delanteras y traseras
			HEMBRA Nr. 10.011 – 10.016 Etiqueta con PUNTO ROJO o femina	MACHO Nr. 10.021 – 10.026 Etiqueta con PUNTO AZUL o male		
10.011 10.021	dog&cat-body	XS	1. Yorkshire Terrier pequeño, Lhasa pequeño, Chihuahua, Papillion	15-20	20-30	24
10.012 10.022	dog&cat-body	S	Maltés, Basset enano, Caniche enano, Spitz, Terrier, Bichón	20-25	30-40	38
10.013 10.023	dog&cat-body	M	Basset, Fox terrier, Jack Russell Terrier, Doguillo, Caniche, Beagle	25-35	40-50	46
10.014 10.024	dog&cat-body	L	Collie, Appenzeller, Chow Chow, Schnauzer, Cocker Spaniel	35-45	45-60	50
10.015 10.025	dog&cat-body	XL	Pastor, Dobermann, Dálmata, Golden Retriever, Dogo	45-55	60-75	60
10.016 10.026	dog&cat-body	XXL	San Bernardo, Mastín, Gran Pastor, Rottweiler, Gran Danés	55-60	65-90	67

CONSEJOS

- Cada dog&cat-body lleva su correspondiente etiqueta en la parte superior interior de delante (xs, s, m, l, xl, xxl).
- Primero de todo pase el dog&cat-body por la mano para que la parte final se encuentre a la altura de sus dedos. A continuación, póngaselo al perro o al gato empezando por la cabeza y dejando pasar primero las patas delanteras y luego las traseras por las aberturas. En caso de que se trate de un macho, asegúrese de que el pene también salga por la abertura.
- Alise el dog&cat-body y listo.
- Elección de la talla: la distancia entre las patas delanteras y traseras así como la medida del tórax pueden darle una indicación rápida. Por otro lado, le pueden ayudar los nombres de las razas señalados.

Ya que el material de alta calidad de elastán y poliamida ofrece una óptima elasticidad tanto en longitud como en sentido transversal, el dog&cat-body debe ser un poco más pequeño que el perro o el gato para que se adapte bien. Además, el efecto elástico del dog&cat body para las hembras permite una mayor curvatura en la zona inferior posterior, lo que permite que puedan "hacer pipí" de forma más fácil.

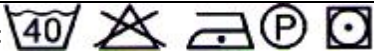

Indicaciones de lavado: 
 Material: 90 % Poliamida 10 % Elastán (90/10 PA/EL).

Esperamos que disfrute de este producto de alta calidad. Para cualquier pregunta, contacte con nosotros por FAX o E-MAIL. **Su equipo VedMedCare**