

VETMEDCARE
FRAGEN UND ANTWORTEN F & A
QUESTIONS AND ANSWERS Q & A


ZEICHENERKLÄRUNG
FA01... Bilder
V01, ... Video,
Z01, ... Zeichnung,

1
Was sind die Produkte?

Es gibt drei Produktgruppen, und zwar:
 1. Der **Body** ist ein Kleidungsstück aus einem elastischen Textil gefertigt für die Abdeckung des Körpers von Tieren und hält selbständig am Körper. Muss nicht zusätzlich verschlossen werden. Body für Hündinnen und beim Rüden mit einem zusätzlichen Loch



FA01

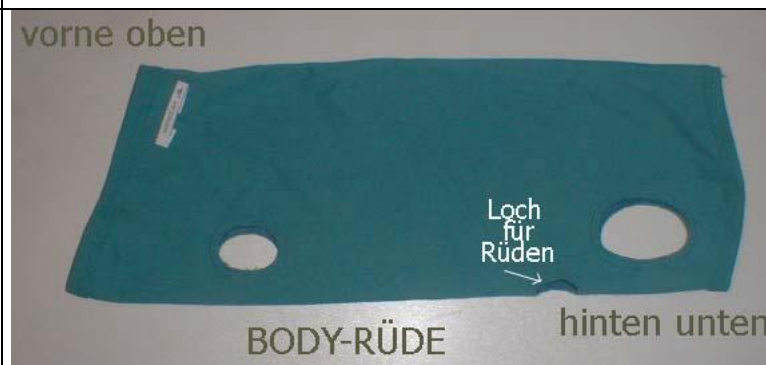




FA02



FA03

2. Die **Beinlinge** sind ein gerader oder konischer Schlauch aus einem elastischen Textil gefertigt, Sie können entweder an den Body

	<p>angeklickt werden oder auch als Einzellösung verwendet werden: Kopf, Augen, Ohren, Hals, Nacken, Schwanz, Bein.</p>		
		FA04	
	<p>3. Druckknöpfe: Die Druckknöpfe können durch zwei Stofflagen durchgedrückt werden und fixieren so rasch und zuverlässig. Kein Annähen nötig, können wieder leicht geöffnet werden und hinterlassen keine Löcher im Stoff.</p> <p>4.</p>		
		FA05	
		FA06	
2	<p>Was ist der Nutzen? Hilft die Wunde oder die Haut zu schützen. Ermöglicht durch das Loch auch den Rüden „pipi“ zu machen ohne lästiges Ausziehen. Erspart den Trichter (Elisabethen).</p>		
3	<p>Für wen ist es? Für Hunde, Katzen, Mäuse, Rattten, Frettchen, Hamster, Meerschweinchen, Vögel, Sittiche, Papageien, Flaken, Schwan, Storch, Schafe, Zebra, Pferd, Schweine, Fische, Koi, Wildtiere, Reptilien,etc.</p>		
4	<p>Welche Artikel haben Sie? Bodies, : 6 Größen von xs s m l xl xxl einmal für die Hündin, einmal für den Rüden mit zusätzlichem Loch; für die</p>		

Katze und den Kater verwendet man den Body für die Hündin: meist xs und s. Bei kleineren Katzen verwendet man die Beinlinge.. Sind einzeln verpackt mit Etikette und Artikelnummer, Größenkennzeichnung, Firmenlogo und Partnerlogo.

Die genauen Maße sowie eine Anziehanleitung, Hunderassen zu den Größen, Pflegehinweise, etc. finden Sie unter: www.vertedcare.at -> Land auswählen -> Maßtabelle.

Beinlinge: 4 Größen



xxs – small - klein
 xs – medium – mittel
 m – large – groß
 con – konisch.

Jeweils 1 m lang, Durchmesser verschieden, der konische Beinling hat verschiedene Durchmesser oben und unten. Es gibt sie einzeln verpackt oder als Set mit allen vier Größen und Druckknöpfen.

Druckknöpfe: 18 Stück in einer Blisterverpackung, Kunststoffdruckknöpfe, 10mm Durchmesser, lassen sich leicht durch zwei Stofflagen durchdrücken, verkleben gut, müssen nicht angenäht werden.

Auf der Rückseite der Blisterverpackung ist die Etikette mit der Bezeichnung und Artikelnummer leicht zu finden.




5 Wie zieht man Bodies, Beinlinge, Druckknöpfe an?

Bodies: Beim Hals innen ist die Größenetikette, außen das Firmenemblem, dies ist die Kopfseite. Body wie einen Strumpf von vorne bis hinten zusammenhalten und über den Kopf des Tieres streifen. Vorderbeine in die Fußöffnungen für die Vorderpfoten geben, dann nach hinten ziehen, Hinterbeine durch die Öffnungen für die Hinterbeine stecken, bitte Beine gut anwinkeln, damit die Nähte bei den Beinöffnungen nicht überstreckt werden, fertig. Beim Rücken darauf achten, dass nicht ein Bein in das mittlere Loch gerät.

V01

Beinlinge: je nach Größe wird die richtige Länge abgeschnitten (Material reißt nicht ein, keine Laufmaschen), am Bein, Kopf, Schwanz, etc. übergezogen und am Body mit den Druckknöpfen angeklickt. Fertig. Bei

Z

	Lösungen ohne Body werden je nach Verwendung Öffnungen für die Augen, Ohren, Beine, Schwanz eingeschnitten.		
	<p>Druckknöpfe: Bei den Druckknöpfen wird der Druckknopf mit dem Zäpfchen von der unteren Stofflage außen, auf die obere Stofflage gedrückt und bei der oberen Stofflage wird der Druckknopf mit dem Loch von außen dagegen gedrückt bis beide Teile einrasten. Leicht wieder zu öffnen. Bei Bedarf können sie auch angenäht werden.</p> 		V 02
6	<p>Wie zieht man Bodies, Beinlinge aus?</p> <p>Bodies; Hinterbeine vorsichtig herausnehmen, dann einfach Richtung Kopf und über den ziehen. Bei gesunden Vorderbeinen hilft das Tier automatisch mit. In umgekehrter Richtung auch möglich, dann aber jeweils vorsichtig die Beine herausschlüpfen lassen. Geschmeidig arbeiten.</p> <p>Beinlinge: Einfach in umgekehrter Richtung wie beim Anziehen ausziehen. Bei Kombinationen eventuell Druckknöpfe öffnen.</p> <p>Druckknöpfe: lassen sich mit den Fingernägeln leicht auseinanderdrücken und öffnen.</p>		V03
7	<p>Wofür sind die Beinlinge? Was tun Sie mit den Beinlingen?</p>		
	<p>1. zum Schutz der Beine. Sie werden je nach Beingröße in der entsprechenden Länge abgeschnitten und übers Bein gezogen und am Body angeklickt. Material reißt bei der Schnittstelle nicht ein. Bei größeren Tieren wird bei den Hinterläufen die Verwendung der konischen Beinlinge empfohlen.</p>		
	<p>2. zum Schutz der Pfoten: Beinling wird länger gelassen, über die Pfote hinaus, oben am Body angeklickt, das untere Ende am Ende mit Druckknöpfen zugeklickt oder umgebogen und am Bein angeklickt.</p> <p>3. zum Schutz des Schwanzes. Je nach Tiergröße wird ein gerader oder der konische Beinling verwendet, in der richtigen Länge abgeschnitten und am Body mit den Druckknöpfen fixiert.</p> <p>4. zum Schutz des Kopfes, je nach Kopfgröße verwenden Sie einen geraden oder den konischen Beinling. Beim konischen Beinling ist es wichtig so weit hineinzuziehen, dass der konische Bereich eng auf der Schnauze anliegt, ist er zu weit, rutsch er über den Kopf hinweg. Hilfsmaßnahme: beim Halsbereich mit einem oder mehreren Druckknöpfen enger machen.</p> <p>5. zum Schutz der Ohren. Es wird ein schmaler Längsschnitt bei den Ohren in den Beinling gemacht – bitte eng – sonst rutscht das Ohr</p>		

	<p>heraus – und das Ohr durchgezogen. Mit einem passenden anderen Beinling wird dann ein Stück über das Ohr gezogen und am Kopfteil mit Druckknöpfen fixiert. Bei Hämatomen können beide Ohren so geschützt werden. Es ist auch möglich mit einem etwas längeren Stück Beinling beide Ohren gleichzeitig abzudecken und rechts und links zu fixieren.</p> <p>6. zum Schutz der Augen. Es kann z. B. um ein Auge ruhig zu halten der Beinling dort zu sein, und nur eine Öffnung für ein Auge wird ausgeschnitten, dass das Tier sehen kann. Damit bleibt es ruhiger und kann sich orientieren.</p> <p>7. für Teillösungen bei kleineren Tieren und Vögeln:</p> <ul style="list-style-type: none"> • zum Schutz des Kopfes, der Ohren, des Nackens und Halses. Ein Stück Beinling wird von der Schnauze bis zur Körpermitte gezogen. Augen- und Ohren- und Beinöffnungen anbringen. Fertig. Damit fixiert man den Beinling durch die Ohren und die Beine und vermeidet ein Verrutschen. • Zum Schutz des Schwanzes. Ein Stück Beinling, meist der konische Beinling, wird vom Schwanz her über das Tier bis zur Körpermitte gezogen. Hier braucht es nur zwei Beinöffnungen, eventuell beim Rüden noch eine zusätzliche Öffnung. • zum Schutz des Körpers als Ganzkörperlösung bei kleineren Tieren: Katzen, Hamster, Frettchen, Kaninchen, etc. Ein Stück Beinlingschlauch wird entsprechend der Tierlänge, abgeschnitten, der Durchmesser wird so gewählt, dass eine sanfte Streckwirkung am Tierkörper gegeben ist, dann werden die Beinöffnungen ausgeschnitten. Fertig. Es können auch die Beine mit anderen Beinlingen angeklickt werden. • zum Schutz von Vögeln wird ein passender Beinling zugeschnitten. Falls die Flügel sich bewegen dürfen, kann man dafür eine entsprechende Öffnung schneiden. Bei Falken, Papageien, Sittichen ist es vorteilhaft, wenn der Body über den Kopf geht. Hier dann Öffnungen auch für die Augen ausschneiden, damit der Vogel den Beginn des Beinlings nicht fassen kann und leicht auszieht. Bei großen Vögeln wie Schwan und Storch wird der Beinling für die Pferde verwendet, Sondergröße, der dünne Teil davon für den Halsbereich. • zum Schutz von Fischen – Koi. Ganzer oder Teile des Körpers. Hier werden die Öffnungen für die Flossen vorgeschritten und dann unter Wasser angezogen. ACHTUNG: Die Kiemen müssen frei bleiben, nicht dass sie durch die Streckwirkung des Beinlings nicht arbeiten können. 		
	<p>8. zum Schutz der Pfoten: Beinling wird länger gelassen, über die Pfote hinaus, oben am Body angeklickt, das untere Ende am Ende mit Druckknöpfen zugeklickt oder umgebogen und am Bein angeklickt.</p> <p>9. zum Schutz des Schwanzes. Je nach Tiergröße wird ein gerader oder der konische Beinling verwendet, in der richtigen Länge abgeschnitten und am Body mit den Druckknöpfen fixiert.</p> <p>10. zum Schutz des Kopfes, je nach Kopfgröße verwenden Sie einen geraden oder den konischen Beinling. Beim konischen Beinling ist es wichtig so weit hineinzuziehen, dass der konische Bereich eng auf</p>		

	<p>der Schnauze anliegt, ist er zu weit, rutsch er über den Kopf hinweg. Hilfsmaßnahme: beim Halsbereich mit einem oder mehreren Druckknöpfen enger machen.</p> <p>11. zum Schutz der Ohren. Es wird ein schmaler Längsschnitt bei den Ohren in den Beinling gemacht – bitte eng – sonst rutscht das Ohr heraus – und das Ohr durchgezogen. Mit einem passenden anderen Beinling wird dann ein Stück über das Ohr gezogen und am Kopfteil mit Druckknöpfen fixiert. Bei Hämatomen können beide Ohren so geschützt werden. Es ist auch möglich mit einem etwas längeren Stück Beinling beide Ohren gleichzeitig abzudecken und rechts und links zu fixieren.</p> <p>12. zum Schutz der Augen. Es kann z. B. um ein Auge ruhig zu halten der Beinling dort zu sein, und nur eine Öffnung für ein Auge wird ausgeschnitten, dass das Tier sehen kann. Damit bleibt es ruhiger und kann sich orientieren.</p> <p>13. für Teillösungen bei kleineren Tieren und Vögeln:</p> <ul style="list-style-type: none"> • zum Schutz des Kopfes, der Ohren, des Nackens und Halses. Ein Stück Beinling wird von der Schnauze bis zur Körpermitte gezogen. Augen- und Ohren- und Beinöffnungen anbringen. Fertig. Damit fixiert man den Beinling durch die Ohren und die Beine und vermeidet ein Verrutschen. • Zum Schutz des Schwanzes. Ein Stück Beinling, meist der konische Beinling, wird vom Schwanz her über das Tier bis zur Körpermitte gezogen. Hier braucht es nur zwei Beinöffnungen, eventuell beim Rüden noch eine zusätzliche Öffnung. • zum Schutze des Körpers als Ganzkörperlösung bei kleineren Tieren: Katzen, Hamster, Frettchen, Kaninchen, etc. Ein Stück Beinlingschlauch wird entsprechend der Tierlänge, abgeschnitten, der Durchmesser wird so gewählt, dass eine sanfte Streckwirkung am Tierkörper gegeben ist, dann werden die Beinöffnungen ausgeschnitten. Fertig. Es können auch die Beine mit anderen Beinlingen angeklickt werden. • zum Schutze von Vögeln wird ein passender Beinling zugeschnitten. Falls die Flügel sich bewegen dürfen, kann man dafür eine entsprechende Öffnung schneiden. Bei Falken, Papageien, Sittichen ist es vorteilhaft, wenn der Body über den Kopf geht. Hier dann Öffnungen auch für die Augen ausschneiden, damit der Vogel den Beginn des Beinlings nicht fassen kann und leicht auszieht. Bei großen Vögeln wie Schwan und Storch wird der Beinling für die Pferde verwendet, Sondergröße, der dünne Teil davon für den Halsbereich. • zum Schutz von Fischen – Koi. Ganzer oder Teile des Körpers. Hier werden die Öffnungen für die Flossen vorgeschritten und dann unter Wasser angezogen. ACHTUNG: Die Kiemen müssen frei bleiben, nicht dass sie durch die Streckwirkung des Beinlings nicht arbeiten können. 		
	<p>14. zum Schutz der Pfoten: Beinling wird länger gelassen, über die Pfote hinaus, oben am Body angeklickt, das untere Ende am Ende mit Druckknöpfen zugeklickt oder umgebogen und am Bein angeklickt.</p> <p>15. zum Schutz des Schwanzes. Je nach Tiergröße wird ein gerader</p>		

oder der konische Beinling verwendet, in der richtigen Länge abgeschnitten und am Body mit den Druckknöpfen fixiert.

16. zum **Schutz des Kopfes**, je nach Kopfgröße verwenden Sie einen geraden oder den konischen Beinling. Beim konischen Beinling ist es wichtig so weit hineinzuziehen, dass der konische Bereich eng auf der Schnauze anliegt, ist er zu weit, rutsch er über den Kopf hinweg. Hilfsmaßnahme: beim Halsbereich mit einem oder mehreren Druckknöpfen enger machen.

17. zum **Schutz der Ohren**. Es wird ein schmaler Längsschnitt bei den Ohren in den Beinling gemacht – bitte eng – sonst rutscht das Ohr heraus – und das Ohr durchgezogen. Mit einem passenden anderen Beinling wird dann ein Stück über das Ohr gezogen und am Kopfteil mit Druckknöpfen fixiert. Bei **Hämatomen** können beide Ohren so geschützt werden. Es ist auch möglich mit einem etwas längeren Stück Beinling beide Ohren gleichzeitig abzudecken und rechts und links zu fixieren.

18. zum **Schutz der Augen**. Es kann z. B. um ein Auge ruhig zu halten der Beinling dort zu sein, und nur eine Öffnung für ein Auge wird ausgeschnitten, dass das Tier sehen kann. Damit bleibt es ruhiger und kann sich orientieren.

19. für **Teillösungen bei kleineren Tieren und Vögeln**:

- zum **Schutz des Kopfes, der Ohren, des Nackens und Halses**. Ein Stück Beinling wird von der Schnauze bis zur Körpermitte gezogen. Augen- und Ohren- und Beinöffnungen anbringen. Fertig. Damit fixiert man den Beinling durch die Ohren und die Beine und vermeidet ein Verrutschen.

- Zum **Schutz des Schwanzes**. Ein Stück Beinling, meist der konische Beinling, wird vom Schwanz her über das Tier bis zur Körpermitte gezogen. Hier braucht es nur zwei Beinöffnungen, eventuell beim Rüden noch eine zusätzliche Öffnung.

- zum **Schutz des Körpers als Ganzkörperlösung bei kleineren Tieren**: Katzen, Hamster, Frettchen, Kaninchen, etc. Ein Stück Beinlingschlauch wird entsprechend der Tierlänge, abgeschnitten, der Durchmesser wird so gewählt, dass eine sanfte Streckwirkung am Tierkörper gegeben ist, dann werden die Beinöffnungen ausgeschnitten. Fertig. Es können auch die Beine mit anderen Beinlingen angeklickt werden.

- zum **Schutz von Vögeln** wird ein passender Beinling zugeschnitten.

Falls die Flügel sich bewegen dürfen, kann man dafür eine entsprechende Öffnung schneiden. Bei **Falken, Papageien, Sittichen** ist es vorteilhaft, wenn der Body über den Kopf geht. Hier dann Öffnungen auch für die Augen ausschneiden, damit der Vogel den Beginn des Beinlings nicht fassen kann und leicht auszieht. Bei großen Vögeln wie Schwan und Storch wird der Beinling für die Pferde verwendet, Sondergröße, der dünne Teil davon für den Halsbereich.

- zum **Schutz von Fischen** – Koi. Ganzer oder Teile des Körpers. Hier werden die Öffnungen für die Flossen vorgeschritten und dann unter Wasser angezogen. ACHTUNG: Die Kiemen müssen frei bleiben, nicht dass sie durch die Streckwirkung des Beinlings nicht arbeiten können.

20. zum **Schutz der Pfoten**: Beinling wird länger gelassen, über die Pfote hinaus, oben am Body angeklickt, das untere Ende am Ende mit Druckknöpfen zugeklickt oder umgebogen und am Bein angeklickt.
21. zum **Schutz des Schwanzes**. Je nach Tiergröße wird ein gerader oder der konische Beinling verwendet, in der richtigen Länge abgeschnitten und am Body mit den Druckknöpfen fixiert.
22. zum **Schutz des Kopfes**, je nach Kopfgröße verwenden Sie einen geraden oder den konischen Beinling. Beim konischen Beinling ist es wichtig so weit hineinzuziehen, dass der konische Bereich eng auf der Schnauze anliegt, ist er zu weit, rutsch er über den Kopf hinweg. Hilfsmaßnahme: beim Halsbereich mit einem oder mehreren Druckknöpfen enger machen.
23. zum **Schutz der Ohren**. Es wird ein schmaler Längsschnitt bei den Ohren in den Beinling gemacht – bitte eng – sonst rutscht das Ohr heraus – und das Ohr durchgezogen. Mit einem passenden anderen Beinling wird dann ein Stück über das Ohr gezogen und am Kopfteil mit Druckknöpfen fixiert. Bei **Hämatomen** können beide Ohren so geschützt werden. Es ist auch möglich mit einem etwas längeren Stück Beinling beide Ohren gleichzeitig abzudecken und rechts und links zu fixieren.
24. zum **Schutz der Augen**. Es kann z. B. um ein Auge ruhig zu halten der Beinling dort zu sein, und nur eine Öffnung für ein Auge wird ausgeschnitten, dass das Tier sehen kann. Damit bleibt es ruhiger und kann sich orientieren.
25. für **Teillösungen bei kleineren Tieren und Vögeln**:
- zum **Schutz des Kopfes, der Ohren, des Nackens und Halses**. Ein Stück Beinling wird von der Schnauze bis zur Körpermitte gezogen. Augen- und Ohren- und Beinöffnungen anbringen. Fertig. Damit fixiert man den Beinling durch die Ohren und die Beine und vermeidet ein Verrutschen.
 - Zum **Schutz des Schwanzes**. Ein Stück Beinling, meist der konische Beinling, wird vom Schwanz her über das Tier bis zur Körpermitte gezogen. Hier braucht es nur zwei Beinöffnungen, eventuell beim Rüden noch eine zusätzliche Öffnung.
 - zum **Schutz des Körpers als Ganzkörperlösung bei kleineren Tieren**: Katzen, Hamster, Frettchen, Kaninchen, etc. Ein Stück Beinlingschlauch wird entsprechend der Tierlänge, abgeschnitten, der Durchmesser wird so gewählt, dass eine sanfte Streckwirkung am Tierkörper gegeben ist, dann werden die Beinöffnungen ausgeschnitten. Fertig. Es können auch die Beine mit anderen Beinlingen angeklickt werden.
 - zum **Schutz von Vögeln** wird ein passender Beinling zugeschnitten. Falls die Flügel sich bewegen dürfen, kann man dafür eine entsprechende Öffnung schneiden. Bei **Falken, Papageien, Sittichen** ist es vorteilhaft, wenn der Body über den Kopf geht. Hier dann Öffnungen auch für die Augen ausschneiden, damit der Vogel den Beginn des Beinlings nicht fassen kann und leicht auszieht. Bei großen Vögeln wie Schwan und Storch wird der Beinling für die Pferde verwendet, Sondergröße, der dünne Teil davon für den Halsbereich.
 - zum **Schutz von Fischen** – Koi. Ganzer oder Teile des Körpers. Hier

	<p>werden die Öffnungen für die Flossen vorgeschritten und dann unter Wasser angezogen. ACHTUNG: Die Kiemen müssen frei bleiben, nicht dass sie durch die Streckwirkung des Beinlings nicht arbeiten können.</p>		
	<p>26. zum Schutz der Pfoten: Beinling wird länger gelassen, über die Pfote hinaus, oben am Body angeklickt, das untere Ende am Ende mit Druckknöpfen zugeklickt oder umgebogen und am Bein angeklickt.</p> <p>27. zum Schutz des Schwanzes. Je nach Tiergröße wird ein gerader oder der konische Beinling verwendet, in der richtigen Länge abgeschnitten und am Body mit den Druckknöpfen fixiert.</p> <p>28. zum Schutz des Kopfes, je nach Kopfgröße verwenden Sie einen geraden oder den konischen Beinling. Beim konischen Beinling ist es wichtig so weit hineinzuziehen, dass der konische Bereich eng auf der Schnauze anliegt, ist er zu weit, rutsch er über den Kopf hinweg. Hilfsmaßnahme: beim Halsbereich mit einem oder mehreren Druckknöpfen enger machen.</p> <p>29. zum Schutz der Ohren. Es wird ein schmaler Längsschnitt bei den Ohren in den Beinling gemacht – bitte eng – sonst rutscht das Ohr heraus – und das Ohr durchgezogen. Mit einem passenden anderen Beinling wird dann ein Stück über das Ohr gezogen und am Kopfteil mit Druckknöpfen fixiert. Bei Hämatomen können beide Ohren so geschützt werden. Es ist auch möglich mit einem etwas längeren Stück Beinling beide Ohren gleichzeitig abzudecken und rechts und links zu fixieren.</p> <p>30. zum Schutz der Augen. Es kann z. B. um ein Auge ruhig zu halten der Beinling dort zu sein, und nur eine Öffnung für ein Auge wird ausgeschnitten, dass das Tier sehen kann. Damit bleibt es ruhiger und kann sich orientieren.</p> <p>31. für Teillösungen bei kleineren Tieren und Vögeln:</p> <ul style="list-style-type: none"> • zum Schutz des Kopfes, der Ohren, des Nackens und Halses. Ein Stück Beinling wird von der Schnauze bis zur Körpermitte gezogen. Augen- und Ohren- und Beinöffnungen anbringen. Fertig. Damit fixiert man den Beinling durch die Ohren und die Beine und vermeidet ein Verrutschen. • Zum Schutz des Schwanzes. Ein Stück Beinling, meist der konische Beinling, wird vom Schwanz her über das Tier bis zur Körpermitte gezogen. Hier braucht es nur zwei Beinöffnungen, eventuell beim Rüden noch eine zusätzliche Öffnung. • zum Schutz des Körpers als Ganzkörperlösung bei kleineren Tieren: Katzen, Hamster, Frettchen, Kaninchen, etc. Ein Stück Beinlingschlauch wird entsprechend der Tierlänge, abgeschnitten, der Durchmesser wird so gewählt, dass eine sanfte Streckwirkung am Tierkörper gegeben ist, dann werden die Beinöffnungen ausgeschnitten. Fertig. Es können auch die Beine mit anderen Beinlingen angeklickt werden. • zum Schutz von Vögeln wird ein passender Beinling zugeschnitten. Falls die Flügel sich bewegen dürfen, kann man dafür eine entsprechende Öffnung schneiden. Bei Falken, Papageien, Sittichen ist es vorteilhaft, wenn der Body über den Kopf geht. Hier dann Öffnungen auch für die 		

	<p>Augen ausschneiden, damit der Vogel den Beginn des Beinlings nicht fassen kann und leicht auszieht. Bei großen Vögeln wie Schwan und Storch wird der Beinling für die Pferde verwendet, Sondergröße, der dünne Teil davon für den Halsbereich.</p> <ul style="list-style-type: none"> • zum Schutz von Fischen – Koi. Ganzer oder Teile des Körpers. Hier werden die Öffnungen für die Flossen vorgeschritten und dann unter Wasser angezogen. ACHTUNG: Die Kiemen müssen frei bleiben, nicht dass sie durch die Streckwirkung des Beinlings nicht arbeiten können. 		

32. zum **Schutz der Pfoten**: Beinling wird länger gelassen, über die Pfote hinaus, oben am Body angeklickt, das untere Ende am Ende mit Druckknöpfen angeklickt oder umgebogen und am Bein angeklickt.
33. zum **Schutz des Schwanzes**. Je nach Tiergröße wird ein gerader oder der konische Beinling verwendet, in der richtigen Länge abgeschnitten und am Body mit den Druckknöpfen fixiert.
34. zum **Schutz des Kopfes**, je nach Kopfgröße verwenden Sie einen geraden oder den konischen Beinling. Beim konischen Beinling ist es wichtig so weit hineinzuziehen, dass der konische Bereich eng auf der Schnauze anliegt, ist er zu weit, rutsch er über den Kopf hinweg. Hilfsmaßnahme: beim Halsbereich mit einem oder mehreren Druckknöpfen enger machen.
35. zum **Schutz der Ohren**. Es wird ein schmaler Längsschnitt bei den Ohren in den Beinling gemacht – bitte eng – sonst rutscht das Ohr heraus – und das Ohr durchgezogen. Mit einem passenden anderen Beinling wird dann ein Stück über das Ohr gezogen und am Kopfteil mit Druckknöpfen fixiert. Bei **Hämatomen** können beide Ohren so geschützt werden. Es ist auch möglich mit einem etwas längeren Stück Beinling beide Ohren gleichzeitig abzudecken und rechts und links zu fixieren.
36. zum **Schutz der Augen**. Es kann z. B. um ein Auge ruhig zu halten der Beinling dort zu sein, und nur eine Öffnung für ein Auge wird ausgeschnitten, dass das Tier sehen kann. Damit bleibt es ruhiger und kann sich orientieren.
37. für **Teillösungen bei kleineren Tieren und Vögeln**:
- zum **Schutz des Kopfes, der Ohren, des Nackens und Halses**. Ein Stück Beinling wird von der Schnauze bis zur Körpermitte gezogen. Augen- und Ohren- und Beinöffnungen anbringen. Fertig. Damit fixiert man den Beinling durch die Ohren und die Beine und vermeidet ein Verrutschen.
 - Zum **Schutz des Schwanzes**. Ein Stück Beinling, meist der konische Beinling, wird vom Schwanz her über das Tier bis zur Körpermitte gezogen. Hier braucht es nur zwei Beinöffnungen, eventuell beim Rüden noch eine zusätzliche Öffnung.
 - zum **Schutz des Körpers als Ganzkörperlösung bei kleineren Tieren**: Katzen, Hamster, Frettchen, Kaninchen, etc. Ein Stück Beinlingschlauch wird entsprechend der Tierlänge, abgeschnitten, der Durchmesser wird so gewählt, dass eine sanfte Streckwirkung am Tierkörper gegeben ist, dann werden die Beinöffnungen ausgeschnitten. Fertig. Es können auch die Beine mit anderen Beinlingen angeklickt werden.
 - zum **Schutz von Vögeln** wird ein passender Beinling zugeschnitten. Falls die Flügel sich bewegen dürfen, kann man dafür eine entsprechende Öffnung schneiden. Bei **Falken, Papageien, Sittichen** ist es vorteilhaft, wenn der Body über den Kopf geht. Hier dann Öffnungen auch für die Augen ausschneiden, damit der Vogel den

Beginn des Beinlings nicht fassen kann und leicht auszieht. Bei großen Vögeln wie Schwan und Storch wird der Beinling für die Pferde verwendet, Sondergröße, der dünne Teil davon für den Halsbereich.

• **zum Schutz von Fischen** – Koi. Ganzer oder Teile des Körpers. Hier werden die Öffnungen für die Flossen vorgeschritten und dann unter Wasser angezogen. ACHTUNG: Die Kiemen müssen frei bleiben, nicht dass sie durch die Streckwirkung des Beinlings nicht arbeiten können.

Was haben Sie für kleine Tiere?

Hier nehmen Sie die entsprechenden Beinlinge und schneiden sie für Ihr Tier zu. Achten Sie darauf, dass am Körper eine Streckwirkung gegeben ist.

Was haben Sie für große Tiere?

Für Pferde, Zebras, Esel, gibt es derzeit die Lösung mit den Beinlingen. Hier kommt der **konische Beinling** oder der **Pferdebeinling** zum Einsatz.

Für den Kopf-, Hals- und Kruppenbereich als auch Ganzkörperlösung sind Produkte in Vorbereitung.

Gibt es für die verschiedenen Geschlechter verschiedene Lösungen?

Ja, bei den Hunden gibt es eine Lösung für die Hündin und einen Body für den Rüden – mit zusätzlichem Loch.

Bei den Katzen wird der Body wie bei der Hündin verwendet. -> Catline.

Welche Bodygrößen gibt es?

Dog&cat body: xs, s, m, l, xl,xxl

Catline: mini xxs xs, s

Welche Beinlinggrößen gibt es?

Xxs – small: Umfang 3,5 cm Länge 1 m

Xs – medium: Umfang 5,5 cm Länge 1 m

M – large: Umfang 8 cm Länge 1 m

Con – konisch: Umfang unten: 4 cm oben: 13,5 cm Länge 1 m.

Beinling für Pferde: 1,50 Länge konisch

Package für Pferde: Pferdebeinling + Superkleber + 2 Packungen Druckknöpfe + Schleifpapier + Anleitung.

Wir finden keine Lösung für das Tier?

Speziallösungen: bitte direkt www.vetmedcare.com kontaktieren. Genaue Beschreibung des Problems und Kontaktadresse angeben.

Welche Druckknöpfe gibt es?

Kunststoffdruckknopf, Durchmesser 10 mm, 18 Stück in einer Blisterverpackung.

Es gibt auch größere Druckknöpfe, jedoch verkleben die nicht so gut mit dem elastischen Textil und können auch leichter von den Tieren geöffnet werden (Krallen Zähne). Bei größeren Tieren, wie z. B. Zebra, Pferd kann man am Rücken leichter mit den großen Druckknöpfen arbeiten.

Können Druckknöpfe geschluckt werden?

Könnte bei überaktiven Tieren vorkommen. Je nach Größe des Tieres sind keine Komplikationen zu erwarten. Im Zweifelsfalle den Tierarzt konsultieren. Das Material selbst ist aus Kunststoff, Polyäthylen PE und unverdaulich.

Wie sind die Produkte erhältlich?

Bodies: jedes Stück einzeln verpackt

Beinlinge: **im 4-er Set**: small, medium, large und konisch und zusätzlich eine Packung Druckknöpfe;
oder **einzeln verpackt**.

Wo sind die Produkte erhältlich?

1. Privatkunde: bei ihrem örtlichen Tierarzt. Liste eventuell beim Großhändler erfragen (www.vetmedcare.com -> Ihr Land anklicken -> Großhändler auswählen).
2. Tierarzt, Tierklinik: bei Ihrem landesspezifischen Großhändler. Sie finden die Adresse auch unter: www.vetmedcare.com -> Ihr Land anklicken -> Großhändler
3. Vetmedcare: Nur wenn Sie auf der homepage Ihr Land nicht vorfinden. Diese wird laufend aktualisiert.
Die Liste mit Stand: Juli 2008 finden Sie hier: -> [Länder](#)

Wie fixiert man die Druckknöpfe?

Body + Beinling: z. B. Beinling durch die Beinöffnung ziehen. Von innen her mit dem Druckknopf mit dem Zäpfchen arbeiten, außen auf dem Body mit dem Druckknopfteil mit dem Loch gegendrücken. Fertig.

Bei Beinlingen beim Ohr, Hals, etc. ebenso.

WICHTIG: Überlappend halten die Druckknöpfe auf Zugwirkung und sehr gut. Bei paralleler Stoffführung ist ein Aufspringen möglich.

Wofür verwendet man die Druckknöpfe?

Zum Fixieren der Beinlinge am Body

- zum Schließen der Beinlinge als Pfotenschutz
- zum Fixieren von Beinlingen beim Ohr
- zum Fixieren von Beinlingen am Schwanz
- zum Enger machen beim Hals, damit der Beinling nicht so leicht über den Kopf wegrutscht
- zum Fixieren einer **Schleife für das Halsband**
- zum Fixieren eines Stoffteils hinten; **HOTSPOT**.
- zum Fixieren eines Beinlings für den Schwanz am Body
- zum Fixieren einer **sterilen Wundauflage** am Body
- zum Fixieren des **Bodies am Halsband**, bei größeren Größen möglich
- zum Fixieren eines zweiten Beinlingstückes unter dem Body oder Beinling
- zum Fixieren von einem **Flies** ; Probleme bei den **Hinterläufen bei älteren und größeren** Hunden.
- zum Fixieren von **Taschen** zur Aufnahme von Kleingeräten, Infusionsflaschen, etc.

Welche Referenzen gibt es?

Schwan -> pdf UK

Zebra -> pdf DE
Skunk -> pdf DE
Schaf -> pdf USA
Katze -> pdf UK

Ist der Body, der Beinling waschbar?

Ja. Einmal in der Waschmaschine bis 40 Grad Celsius oder im Waschbecken.
Wichtig: Der Body oder der Beinling ist sofort trocken, wenn man ihn in einem Frottierhandtuch trockenrollt und kann so gleich wieder angezogen werden.

Was ist CATLINE?

Dies ist die Bodygruppe für Katzen, ganz kleine Hunde
Body [mini](#), [xxs](#), xs, s

Können Wirkstoffe eingebracht werden?

Bitterstoffe: Nach dem Waschen im Waschbecken kann auch in ein neues Wasser z. B. etwas „Bitter-Apple“ – eine Lösung die die Tiere nicht Lecken mögen, um so vor allem bei Kleintieren wie Hamster, Ratten, Meerschweinchen, das Lecken und Nagen hintanzuhalten – beigegeben werden. Im Handtuch trocken rollen. So verbleibt der Wirkstoff im Body oder Beinling.

Kamillosan: ins Becken geben, Body oder Beinling durchwaschen, dann im Handtuch trocken rollen..

Aloe Vera: ins Becken geben, Body oder Beinling durchwaschen, dann im Handtuch trocken rollen

Gibt es eine Lösung für die Hündin und Katze?

Es gibt einen Body für die Hündin und die Katze: **FEMALE**

Gibt es eine Lösung für den Rüden und den Kater?

Für den Rüden gibt es den Body: **MALE**. Für den Kater verwendet man **FEMALE**.

Kann man Sonden fixieren?

Bei einem EKG hält der Body die Sonden durch die Streckwirkung an der gewünschten Stelle.

Kann man eine sterile Unterlage fixieren?

Ja. Machen Sie in die Unterlage – Baumwolle oder Kunstoffschaumenlage ein kleines Loch, dass der Druckknopf mit dem Zäpfchen durchreicht. Dann drücken Sie diesen außen vom Body mit dem zweiten Teil des Druckknopfes mit dem Loch dagegen. Meist reichen zwei Druckknöpfe

Kann man in den Body oder den Beinling ein Loch schneiden?

Ja, das Material gibt keine Laufmaschen.

Es gibt mehrere Schnittarten:

- gerader Schnitt: Beinlinge kürzen
- rundes Loch: für die Pfoten, Augen
- ovales Loch: für das zweite Bein als Öffnung
- Schlitz: für das Ohr

Gibt es spezielle Anwendungen?

Ja.

Beim Tier: Z. B. Schwan, Zebra, Skunk, Papagei, Schaf, Schwein, Maus, Fisch

Von der Funktion: Kopf-Ohr, Schwanz, Hotspot, Ring für Halsband, Taschen für Kleingeräte, Infusionsflaschen, etc.

Welche Zusatzprodukte gibt es?

- Plüschhund Jingi
- Wandcollage mit Beinlingen und Druckknöpfen
- Faltbare Collage mit allen Bodygrößen xs xxl gemisch female/male.
- Posters
- Maxikarten
- Prospekte in vielen Landessprachen
- Maßstabellen
- Laminierte Blätter mit Anwendungsdarstellungen
- Motoroll: sich drehendes Leinwandposter
- Flyer: A4 große Darstellungen wie auf Maxikarten
- Powerpointpräsentationen
- CD mit Bildern für Kataloge, Werbeaussendungen, Zeitungsartikel, etc.
- Briefmarke VETMEDCARE mit den vier Hunden.
- T-Shirt mit Aufdruck Vetmedcare und vier Hunde
- Kuli
- Caps
- Tischkalender
- Haftnotizen
- Adressaufkleber
- Magnetbild für Auto

Auf welchen Messen kann man direkt Kontakt bekommen?

Meist sind wir im Jahr bei 20 bis 30 Tierärztkongressen als Aussteller oder bei unseren Länderpartnern am Stand. Sie finden uns im Veranstaltungskatalog unter Vetmedcare oder unter dem Namen des jeweiligen Partners (Alcyon, Henry Schein, Provet, Heiland, etc.). Sie finden die Namen auf der homepage beim jeweiligen Land.

2005: Berlin

2006:

2007:

2008: Orlando USA, Las Vegas USA, Birmingham UK, Baden-Baden DE, Luxemburg LUX, Interlaken CH, Dublin IE, Tokio JA, Schönewerd CH, Salzburg AT, Düsseldorf DE, Kettering UK, Uppsala SE, Aarhus DK, Strasbourg FR.

Kann man auch über e-bay kaufen?

Gelegentlich gibt es einen Artikel, aber nur sporadisch.

Gibt es die Möglichkeit für Kleinpräsentationen?

Ja. Auf Anfrage kann jede Klinik oder Interessensgruppe eine Präsentation in Ihrem Hause bekommen.

Wie erfahren Nurses und das technische Personal von VetMedCare?

Einmal auf den Messen bei den Tierärztekongressen und auch bei Schulungen von Nurses und technischem Personal.

Welche Maxikarten gibt es?

Derzeit für:

Pferd, Zebra, Schwein, Schwan, 10 Tipps, Meerschweinchen, Fisch – Koi, Hund, Katze, Schaf.

Sie finden sie: <http://www.vetmedcare.com> -> news&pdf's

Welche Postkarten gibt es?

Derzeit für:

10 Tipps, 4-Hunde (Cindrilil, Kessey, Spam, Joe), Family (neun Hunde)

Sie finden sie: <http://www.vetmedcare.com> -> news&pdf's

Welche Flyer gibt es?

Pferd, Katze, Koi – Fisch, Hund, Schaf, Schwan.

Welche Videos sind abrufbar?

1. Fisch – Koi
2. vier Hunde + Meerschweinchen in der Praxis

Direkt über die Homepage: www.vetmedcare.com - > klicken Sie auf den Fisch oder bei news& pdfs.

Wo findet man die Produkte?

Im Katalog und auch teilweise im Internet des jeweiligen Vertriebspartners in Ihrem Land: www.vetmedcare.com -> Land aussuchen. Falls Ihr Land nicht vertreten ist, kontaktieren Sie uns direkt.

Wie findet man die richtige Größe?

In der Maßtabelle sind sowohl Richtungsmaße – Körperumfang, Abstand von Vorderlauf zu Hinterlauf , Halsumfang – als auch Tierrassen angegeben.

Wichtig: Der Body sollte immer kleiner als das Tier sein, damit ein guter Strech am Körper besteht.

Die Größen sind überlappend, d. h. dass z. B. xs längs oder quer gedehnt in die Größe von S hineinreicht, also wo schon eine Größe „S“ möglich ist, kann man zwischen „XS“ stark gestreckt und „S“ beginnt erst zu strechen.

In welchen Ländern gibt es die Produkte von vetmedcare?

Hier die Länder:

AT Z

Falls Ihr Land hier noch nicht vertreten ist, wenden Sie sich an Vetmedcare direkt: www.vetmedcare.com.

Wie löse ich ein Hotspot Problem?

Sie nehmen ein Stück Beinling, schneiden diesen auf. Sie erhalten ein Rechteck. Schneiden Sie in dieses in die Mitte ein rundes Loch, ziehen den Schwanz des Tieres durch und klicken den Stoff am Body fest. Fertig.

Wo finde ich die Maßtabelle?

Im Internet: www.vetmedcare.com -> bei Ihrem Land.

Welche Lösung gibt es bei einer Schulterverletzung?

Entweder Sie nehmen einen Body oder Sie können die Stelle mit einer Einbeinlösung abdecken.

Welche Lösung gibt es bei Bisswunden an der Schulter und am Körper?

Entweder Sie nehmen einen Body oder Sie können die Stelle mit einer Einbeinlösung abdecken.

Kann man den Body bei Hautproblemen einsetzen?

Sehr gut. Das Material ist hochwertig und es sind bis jetzt keine Allergiereaktionen bekannt. Kann bei Bedarf mit dem zur Behandlung geeigneten Wirkstoff getränkt und im Handtuch trockengerollt werden, sodaß auch hier eine weitere Unterstützung hinzukommt.

Kann man ein Wattepad fixieren?

Wie bei einer sterilen Unterlage. Einfach zwei kleine Löcher hineinmachen, sodaß der Druckknopf mit seinem Zäpfchen durchkommt. Am Body außen dann mit dem Druckknopf mit dem Loch gegendrücken und fixieren.

Wann nehme ich einen doppelten Beinling?

Gibt es eine Verletzung am Bein z. B. wo der Verband speziell angedrückt werden sollte, dann nehmen Sie ein kürzeres und vielleicht auch engeres Stück Beinling, streifen dies erst über und ziehen dann darüber den anderen Beinling. Mit den Druckknöpfen fixieren Sie den unteren an dem äußeren Beinling. Fertig.

Wie werden Fische eingepackt?

Sie bereiten zunächst den Beinling mit den Öffnungen für die Flossen vor. Bei einem sehr lebhaften Fisch können Sie mit Beruhigungstropfen den Fisch beruhigen und ziehen dann im Wasser den Body über. Fertig.

Gibt es einen Moskitoschutz?

Derzeit noch nicht. Sie können jedoch den Body mit geeigneten Mitteln tränken oder besprühen.

Wie sind die Nähte genäht?

Alle Nähte sind elastisch genäht.

Wo finde ich die Größenetikette?

Beim Body innen beim Hals ist eine Größenetikette (xs ...xxl) eingenäht, außen das Original Firmenlogo VETMEDCARE.

Wie kann man den Body, Beinling waschen?

In der Waschmaschine bis 40 Grad Celsius oder von Hand im Waschbecken. Normal trocknen oder im Trockner. Sofort trocken ist der Body wenn Sie ihn im Handtuch ausrollen.

Auf was ist bei der Bodywahl zu achten?

Der Body sollte stets kleiner als das Tier sein. Ein angenehmer Streich am Körper beruhigt das Tier, eventuell darunter liegender Verband hält besser, kann zusätzlich mit Druckknöpfen am Body fixiert werden. Die Tiere akzeptieren leichter den Body.

Material:

Polyamid 90 % und 10 % Elastan : (90PA/10EL)

Reißt nicht ein, keine Laufmaschen – somit können Löcher eingeschnitten werden .

Gibt es einen Plüschhund für Demonstrationen?

Plüschhund JINGILIL

Jingi solo

Jingi mit Body

Jingi mit Body und Bein

Jingi mit Kopf- und Ohrverband

Wie erfahre ich die Preise?

Die Preise erfahren Sie bei Ihrem Distributor in Ihrem Land. Als Kunde finden Sie den Preis bei Ihrem Tierarzt oder bei Ihrer Tierklinik in der Region oder Stadt.

Manchmal gibt es Spezialpreise für ein komplettes Package (z. B. alle Produkte + Beinlinge.)

Wenn Sie in einem Land sind ohne Distributor, dann kontaktieren Sie uns direkt:

www.vetmedcare.com

Wie werden die Maße ermittelt?

Für die Entwicklung wurden zahlreiche Messpunkte berücksichtigt. Für die schnelle Orientierung genügt der Körperrumfang sowie der Abstand von Vorder- zu Hinterlauf.

Gibt es ein Wäschesymbol?

Ja. Sie finden es detailliert in der Maßtabelle im Internet bei Ihrem jeweiligen Land..

Gibt es einen EAN bzw. Bar-Code?

Ja. Auf jeder Verpackung ist eine Etikette mit dem jeweiligen EAN bzw. Bar-Code.

Gibt es Patente?

Ja, und zwar:

GMS 9245 Bodies

GMS 8802 Bodies und Druckknöpfe

Welche Tiere können den Body oder Beinling nutzen?

Falken
Fisch – Koi
Frettchen
Hamster
Hase
Hund
Katze
Maus
Meerschweinchen
Pferd
Ratte
Schaf
Schwan
Schwein
Stinktief
Storch
Zebra

Gibt es eine Lösung bei Venenproblemen?

Hier gibt es drei Beinlinggrößen im Spezialangebot mit einem speziellen Druck auf das Bein. Nur auf Anfrage.

Gibt es eine Lösung bei Scheinschwangerschaften bei der Hündin?

Ja. Sie nehmen einen dog&cat Body und fixieren bei allen vier Beinen kurze Beinlinge mit den Druckknöpfen. So kann die Hündin nicht lecken.

Gibt es auch einen Body mit UV-Schutz bzw. Sonnenschutz?

Es gibt bereits den Body mit UV-Schutz 50 + mit Gutachten für Spezialeinsätze.

Welche Bereiche schützt der Body oder der Beinling?

Körper, Beine, Pfoten, Kopf, Hals, Nacken, Augen, Ohren, Schwanz.

Hat der Body einen Textilstandard?

Ja, und zwar ÖKO-TEX Standard 100.

Ich möchte das LOGO von der Tierarztpraxis auf den dog&cat Body drucken?

Zahlreiche Kunden nutzen dieses Angebot bereits. Info im Internet:

www.vetmedcare.com -> LOGO. Fragen Sie direkt an. Wir beraten Sie gerne.
Ab 50 Stück möglich.

Wie fixiere ich eine sterile Einlage?

Mit den Druckknöpfen. In der Einlage zwei kleine Löcher machen, damit die Druckknöpfe durchkommen und außen am Body gegedrückt mit dem Druckknopf mit dem Loch.

Vorteil: Die Einlage rutscht nicht mehr nach unten. Sie bleibt am Platze fixiert und bewegt sich natürlich mit den Bewegungen des Tieres mit.

Wie finde ich mein Land?

Im Internet: www.vetmedcare.com oder Sie fragen uns direkt an.

In welcher Sprache kann ich mit VetMedCare kommunizieren?

Umgehend mit Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Thailändisch. In jeder anderen Sprache möglich, doch es braucht etwas Zeit zur Beantwortung.

Was ist eine Beinlösung?

Z. B. will man nur am Ober- oder Unterschenkel, an der Pfote, am Rücken oder an der Schulter eine Stelle schützen. Hier braucht es oft keinen ganzen Body. Sie nehmen einen Beinling und adaptieren ihn entsprechend.

Wie fixiere ich den Beinling beim Pferd?

Bei der kurzen Lösung:

Huf bis über das Knie: es werden Druckknöpfe auf den Huf mit Superkleber aufgeklebt und bei der gut gereinigten Kastanie. Falls die Kastanie abschält wird hier ein Stück Beinling aufgezogen der knapp sitzt und dann der Beinling angeklickt.

Bei der großen Lösung

wird ebenfalls der Beinling am Huf befestigt – Druckknöpfe am Huf ankleben und Beinling anklicken und oben am Rücken wird der überlappende Stoff mit den Druckknöpfen fixiert.

Gibt es Presseartikel?

Ja, In den verschiedenen Ländern. Direkt von Vetmedcare oder auch durch die jeweiligen Distributoren.

Gibt es Pressematerial?

Ja. Texte und Bilder auf Anfrage. www.vetmedcare.com. Gewünschte Sprache bitte angeben.

Wo bekomme ich weitere Informationen?

1. bei Ihrem Distributor in Ihrem Land, beim Tierarzt, in der Tierklinik.
2. im Internet: news& pdf's
3. internet: prospekt
4. internet: maßstabelle
5. internet: videos + powerpoint presentation
6. direkt bei: www.vetmedcare.com

Gibt es den Body in anderen Farben?

Es gibt den Body in der Farbe grün. Weitere Farben sind nur möglich, wenn auf ein Mal 2000 Stück oder mehr abgenommen werden. Dann wird auftragsgemäß gefertigt.

Kann ein Hund oder eine Katze den Body zerstören?

Im Normalfall nicht. Das elastische Material ist sehr widerstandsfähig.

Wie lange hält der Body?

Bei üblicher Nutzung und Einhaltung der Wachtemperaturen sehr langfristig. Weit über den eigentlichen Nutzungszeitraum bei einer Verletzung oder Operation hinaus. Oft wieder verwendbar. Auch nützlich einige Monate nach einer Operation wenn es regnet oder schneit, zum Schutze des Tieres vor Verschmutzung.

Wo finde ich die Größenkennzeichnung?

Bodys: Ein Mal auf der Packung und ein Mal beim Body auf der Innenseite beim Hals ist die Größenetikette mit der Bezeichnung: xs, x, m, l, xl, xxl eingenäht.

Beinling: nur auf der Verpackung

Druckknöpfe: auf der Verpackung

Wie erkenne ich die Kopf- und wie die Schwanzseite des Bodys?

Bei der Kopfseite finden Sie beim Hals außen das Firmeneblem „VETMEDCARE“ und innen die Größenetikette eingenäht

Wie trockne ich den Body?

Sie können den Body rasch durch Ausrollen in einem Frottierhandtuch trocknen und normal durch Aufhängen oder im Trockner. Beim Waschen die 40 Grad Celsius beachten, sonst leidet die Elastizität.

Wie erkenne ich FEMALE und MALE?

Ein Mal auf der Verpackung „female“ oder „male“ und wenn Sie den Body auspacken erkennen Sie den Body 2male“ leicht an dem zusätzlichen Loch bei den Hinterbeinen in der Mitte.

Wozu dient die Streckfunktion des Textils?

Durch die Streckfunktion des Bodys als auch durch die dehnbar genähten Nähte ist ein angenehmer Tragecomfort gewährleistet und auch das An- und Ausziehen wird damit erleichtert.

Wie kann ich vermeiden, dass die Tiere in den Body hineinbeißen, ihn zu fressen versuchen?

Setzen Sie nach dem letzten Waschen im Waschbecken im Wasser eine Bitterlösung hinzu und trocknen Sie danach ohne weiteres Auswaschen den Body im Frottierhandtuch. So verbleibt das Material im Stoff.

Wählen Sie die richtige Größe. Bei richtiger Wahl haben ist ein guter Strech des Bodys gegeben. Ist der Body zu weit, versuchen die Tiere den Body wegzubekommen.

Welche Richtung hat der Strech?

Der Strech wurde in zwei Richtungen entwickelt. Einmal längs, Sie sehen dies durch die Längsrippen im Stoff und andererseits quer. Somit gibt es eine unproblematische Anwendung sowohl für lange und dünne, als auch für kurze und dicke Tiere.

Aus was ist der Body, sind die Beinlinge gefertigt?

Elastan mit Polyamid. Zwei Fasern, die innenseitig die Feuchtigkeit auf, die außenseitig absorbiert die Feuchtigkeit an die Luft. Ein Skinlife Material mit hohen technischen Eigenschaften.

Gibt es Bildmaterial?

Ja. Einerseits finden Sie unter www.vetmedcare.com > news&pdfs eine Vielzahl von Informationsmaterial. Bei besonderen Wünschen kontaktieren Sie uns direkt. Poster, etc.

Gibt es einen Modellhund?

Ja, und zwar in verschiedenen Ausführungen. Sein Name ist Jingilil.

1. Jingilil: Plüschhund 30 cm lang, 20 cm hoch, ideal für den Body xs.
2. Jingilil: mit Body
3. Jingilil mit Body + Beinling fixiert an einem Bein
4. Jingilil mit Kopf- und Ohrverband
5. Jingilil mit Halskörper- und Schwanzverband

Wo bekomme ich Jingilil, den Modellhund?

Bei Ihrem Distributor oder bei VETMEDCARE.

Gibt es auch ein bedrucktes T-Shirt?

Ja. Mit dem Aufdruck Vetmedcare und die vier Hunde. In den Größen: s, m, l, xl. Erhältlich bei VetMedCare.

Gibt es eine Alternative für den Trichter (Elisabethen)?

Ja. Die dog&cat bodies von Vetmedcare.

Seit wann gibt es Vetmedcare?

Seit Oktober 2005.

Seit wann gibt es den Body in 6 Größen für female und male?

Seit Jänner 2006

Auf welchen Kontinenten gibt es derzeit die dog&cat bodies?

Europa – Asien – USA + Kanada.

Kann man den Body rasch anziehen?

Ja. Der dehnbare Stoff und die dehnbaren Nähte garantieren ein komfortables Anziehen. So erspart man dem Tier und dem Besitzer viel Streß.

Seit wann gibt es die Beinlinge in vier Größen?

Seit Jänner 2006.

Seit wann gibt es den großen Beinling fürs Pferd?

Seit Jänner 2007.

Gibt es eine Lösung für Verletzungen oder Wunden beim Pferd in der Achselhöhle?

Ja. Sie nehmen einen Pferdebeinling und adaptieren ihn für das jeweilige Bein in Form einer Einbeinlösung. Die Länge kann hier leicht variieren und muß nicht am Huf fixiert werden.

Zudem kann eine sterile Wundeinlage an der passenden Stelle mit Druckknöpfen am Pferdebeinling fixiert werden, so besteht ein Schutz und auch Heilmittel können dort leichter aufgebracht werden.

Eine weitere Lösung wäre ein anderes Stück Beinling – zuvor sterilisieren – innen mit den Druckknöpfen an der gewünschten Stelle zu fixieren und zwischen diesem Teil und dem Einbeinling kann dann eine Kompresse positioniert werden.

Bei Katzen gibt es bei Jungen das Problem unterschiedlicher Blutgruppen zur Mutter, z. B. Blutgruppe A und Blutgruppe B. Gibt es hier eine Lösung?

Ja. Sie nehmen einen Body female (Hündin) in der passenden Größe mit Streckwirkung. Eventuell fixieren Sie noch kurze Beinrohre mittels der Beinlinge die Sie entsprechend ablängen und mit den Druckknöpfen anklicken wie Strapse. Somit wird verhindert, dass die jungen Katzenbabies säugen können. Diese müssen ja zunächst mit anderer Nahrung versorgt werden, da sie ja die Muttermilch zunächst nicht vertragen. Mit dem Body wird ermöglicht, dass sie doch die Nähe zur Mutter haben und so sozial gestärkt werden.

Bei den Fragen & Antworten finde ich keine Lösung auf mein Problem?

Senden Sie uns ein Mail mit Ihrer Fragestellung und Ihren Wünschen. Homepage:

www.vetmedcare.at -> Kontakt: Adresse, Telefon- + Faxnummern

Mail: vetmedcare@vetmedcare.at

Stand: 18. August 2008