



## 12 TIPPS für den multifunktionellen Einsatz der Beinlinge + Druckknöpfe

1. Druckknöpfe einfach durch beide Stoffteile zusammendrücken – fertig!
2. Material reißt nicht ein, keine Lautmaschen – Beinlinge beliebig abschneiden.
3. Body + Beinlinge sind leicht waschbar, im Handtuch trockenrollen.
4. Beinling für Body – offen oder geschlossen
5. Ein-Bein-Lösung – Beinling entsprechend zuschneiden und anklicken.
6. Kleintierlösung: vier Löcher in die Beinlinge schneiden, fertig ist der Body für Hamster, Frettchen, Meerschweinchen, Vögel, etc.
7. Hinterteil: Loch für Schwanz schneiden und mit Druckknöpfen fixieren.
8. Kopf – Hals – Ohren: mit dem konischen Teil sowie mit den passenden Beinlingen lässt sich ein individueller Kopfverband gestalten
9. Venenstrumpf – spezielles Design gibt den erforderlichen Stützdruck für das Bein.
10. Scheinschwangerschaften bei der Hündin: kurze Beine anklicken
11. Pferd: Konischer Beinling reicht als Wadenstrumpf; Druckknöpfe am Huf sowie bei der Kastanie aufkleben. Fertig!
12. Pferd Einbeinlösung: wie beim Hund gestalten.



E-Mail: [vetmedcare@vetmedcare.at](mailto:vetmedcare@vetmedcare.at)  
 Internet: [www.vetmedcare.at](http://www.vetmedcare.at)

VetMedCare 